

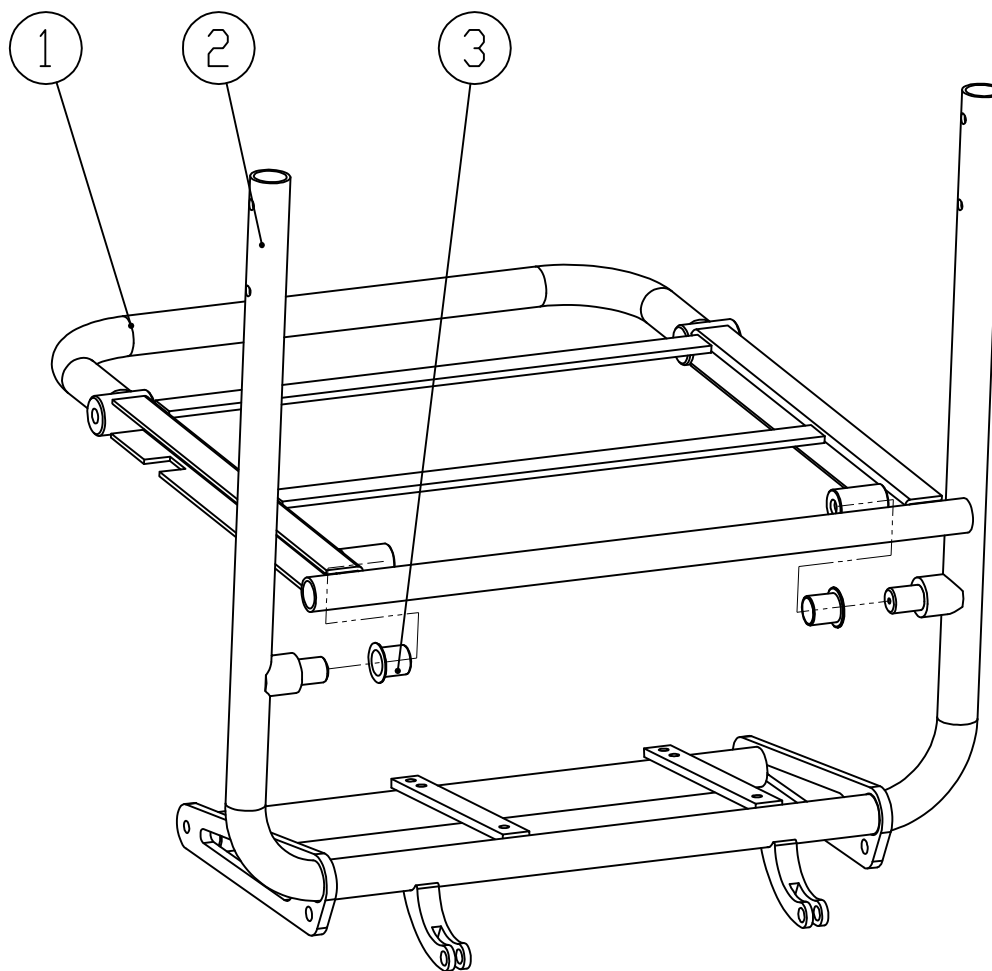


第一视角视图

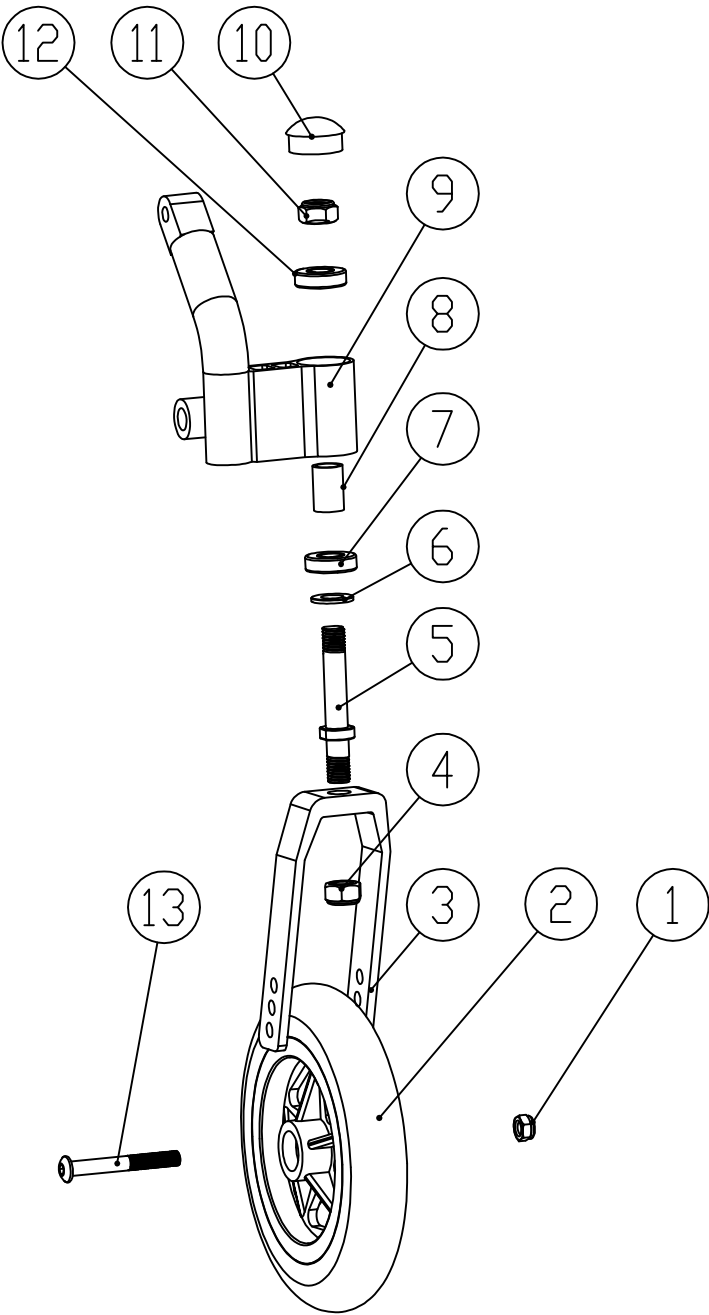

3	D05-04-10	衬套外径21.8x内径14x长度17mm	2				
2	D05-01C/A2.	靠背架	1				
1	D05-04C/A1.	座垫框架	1				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件 重	总计 量	备 注

						设计		日期	
						校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录				签名	审核	数量	
尺寸公差mm (没有说明时选用一般公差)				表面处理		角度	材质	比例	1:4
范围	精度	加严	一般	放宽	镀铬 (CP)	图画中未注明的角度公差为±0.3°	名称	D05爆炸图-9	
>0~10	±0.05	±0.1	±0.3	镀锌 (UCP)			图号	安徽金百合医疗器械有限公司	
>10~50	±0.1	±0.1	±0.5	液体漆 (P)					
>50~100	±0.15	±0.2	±0.8	粉体漆 (PP)					
>100~300	±0.2	±0.3	±1.2	氧化 (OX)					
>300~1000	±0.3	±0.5	±2.0	电泳 (ED)					

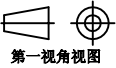

13	030301017	内六角半圆头螺钉M8×65	1
12	030206019	轴承	1
11	030304018	防松螺母M12	1
10	D05-11-04A	防尘盖	1
9	D05-03LC.	前车架左	1
8	D05-11-05	立轴内衬管	1
7	030206019	轴承	1
6	030305022	平垫片M12厚 内12外23厚2	1
5	D05-11-02(A1)	立轴	1
4	030304018	防松螺母M12	1
3	D05-11-01C.	铝前叉	1
2	D05-11-03	轮子	1
1	030304021	防松螺母M8	1
序号	代 号	名 称	数量

					设计		日期	
					校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录			签名	审核	数量	
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)				表面处理		角度	材质	比例
范围	精度	加严	一般	放宽	镀铬 (CP)	名称 D05爆炸图-2 图号 <		


A/0

版本

T-16-03




第一视角视图

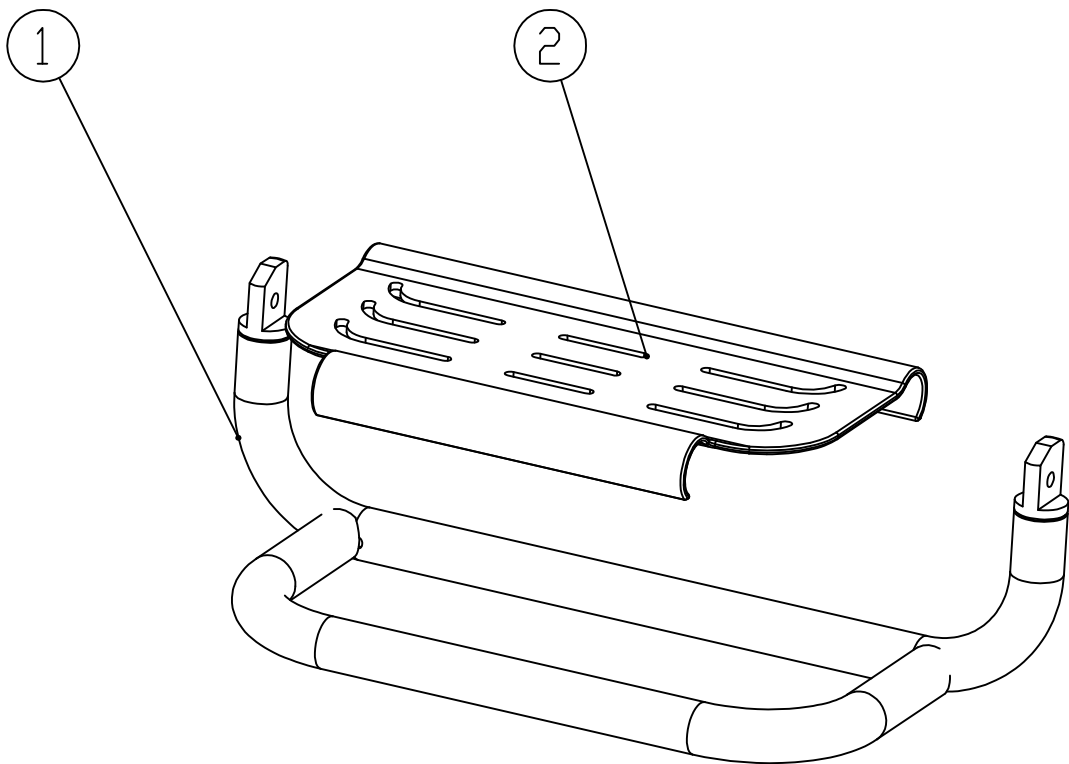


2	D05-08-04	脚踏板	1				
1	D05-08C.	可翻脚踏板组	1				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重	总计量	备 注

								设计		日期	
								校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录					签名	审核		数量	
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)			表面处理			角度	材质		比例	1:3	
范围	精度	加严	一般	放宽	镀铬 (CP)	图画中 未注明 的角度 公差为 ±0.3°	名称	D05爆炸图-3			
>0~10	±0.05	±0.1	±0.3	镀锌 (UCP)	图号						
>10~50	±0.1	±0.1	±0.5	液体漆 (P)							
>50~100	±0.15	±0.2	±0.8	粉体漆 (PP)							
>100~300	±0.2	±0.3	±1.2	氧化 (OX)							
>300~1000	±0.3	±0.5	±2.0	电泳 (ED)							
							安徽金百合医疗器械有限公司				

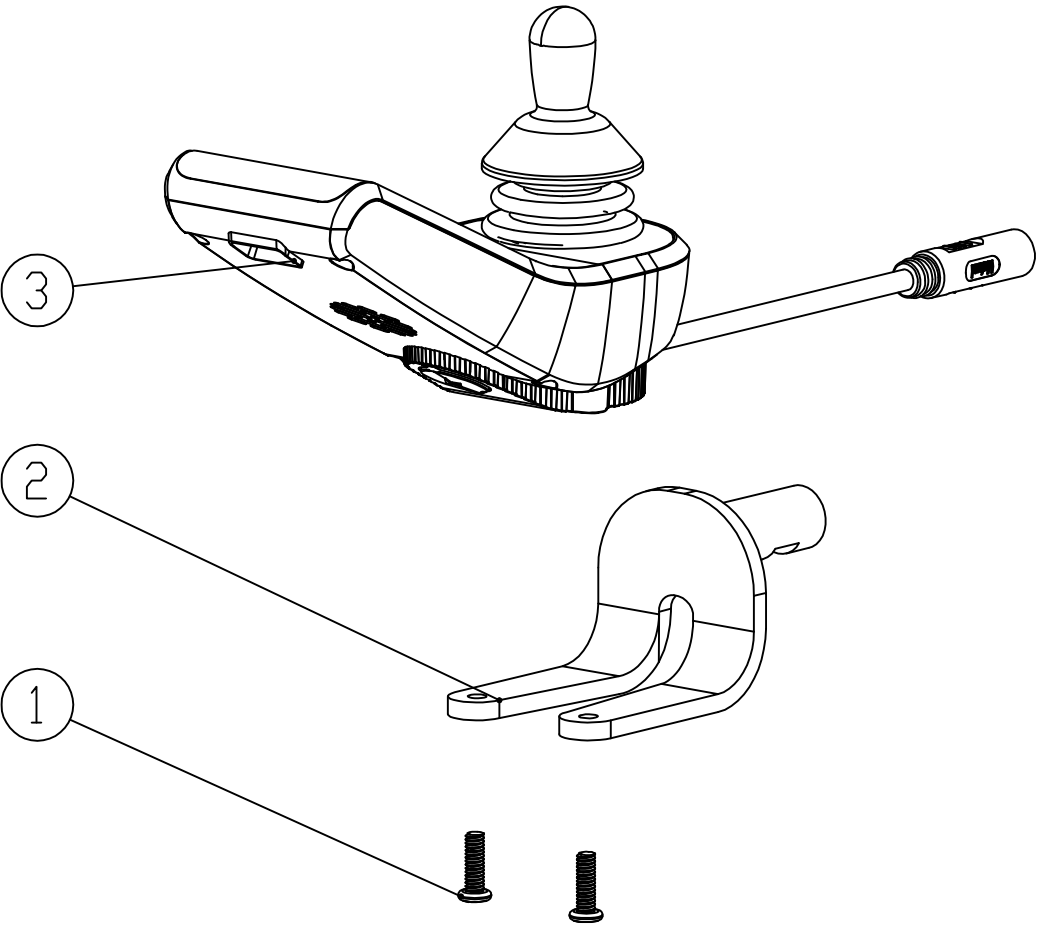


3	MFK01-01-016-01-T	上控(上控 MOGO-二代线束)	1				
2	D05-09C	控制器固定架	1				
1	030306022	十字槽盘头螺钉M5×16	2				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重	总计量	备 注
				设计		日期	
				校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录	签名	审核		数量	
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)		表面处理	角度	材质		比例	1:2
范围	精度	加严	一般	放宽	镀铬 (CP)		
>0~10	±0.05	±0.1	±0.3	镀锌 (UCP)	图 画 中 未 注 明 的 角 度 公 差 为 ±0.3°	名称	
>10~50	±0.1	±0.1	±0.5	液体漆 (P)		图号	D05爆炸图-4
>50~100	±0.15	±0.2	±0.8	粉体漆 (PP)		安徽金百合医疗器械有限公司	
>100~300	±0.2	±0.3	±1.2	氧化 (OX)			
>300~1000	±0.3	±0.5	±2.0	电泳 (ED)			

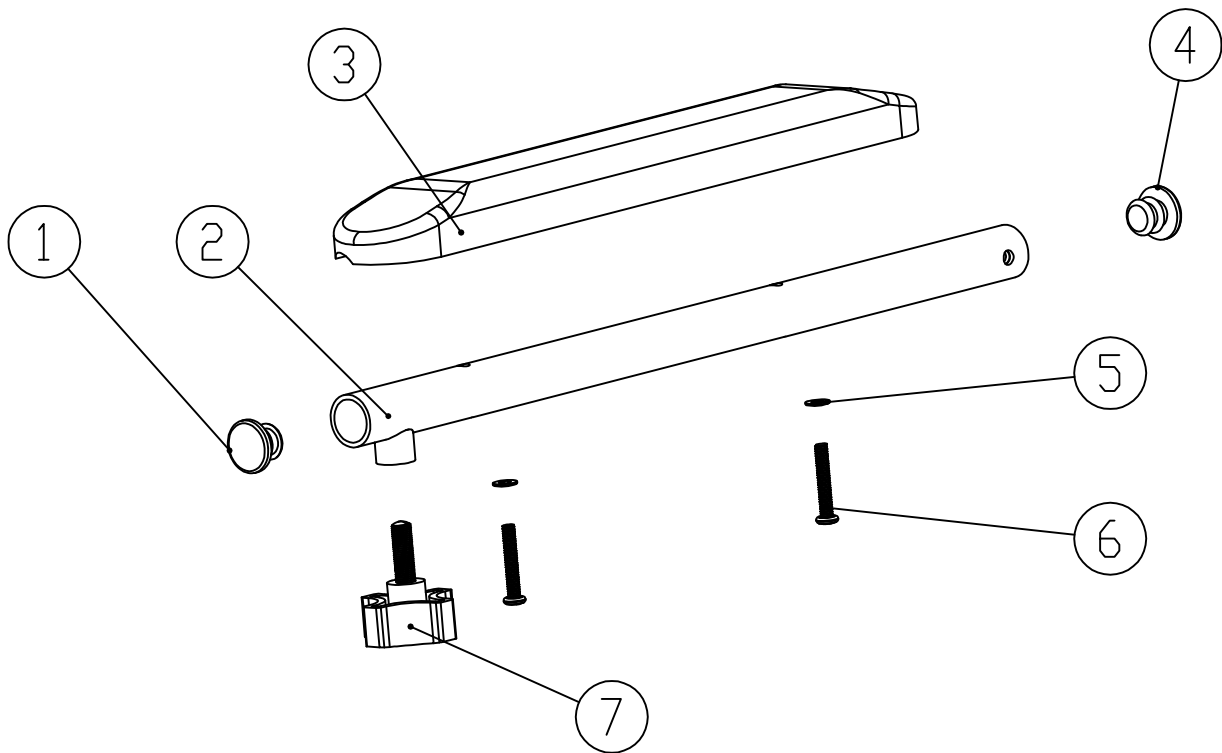


7	P003-554B	梅花旋钮M8×20(有效长度)	1				
6	030306024L	M5×30 加蓝胶	2				
5	030305023	平垫片M5	2				
4	D05-06-08	管塞	1				
3	D05-06-05	扶手垫330mm×45mm牙距190/M5	1				
2	D05-06C.	扶手管组	1				
1	D05-06-06	管塞Φ22×18	1				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重	总计量	备 注

						设计		日期	
						校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录				签名	审核	数量	
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)				表面处理		角度	材质	比例	1:3
范围	精度	加严	一般	放宽	镀铬 (CP)	图画中 未注明 的角度 公差为 ±0.3°	名称	D05爆炸图-5	
>0~10	±0.05	±0.1	±0.3	镀锌 (UCP)	图号		安徽金百合医疗器械有限公司		
>10~50	±0.1	±0.1	±0.5	液体漆 (P)					
>50~100	±0.15	±0.2	±0.8	粉体漆 (PP)					
>100~300	±0.2	±0.3	±1.2	氧化 (OX)					
>300~1000	±0.3	±0.5	±2.0	电泳 (ED)					

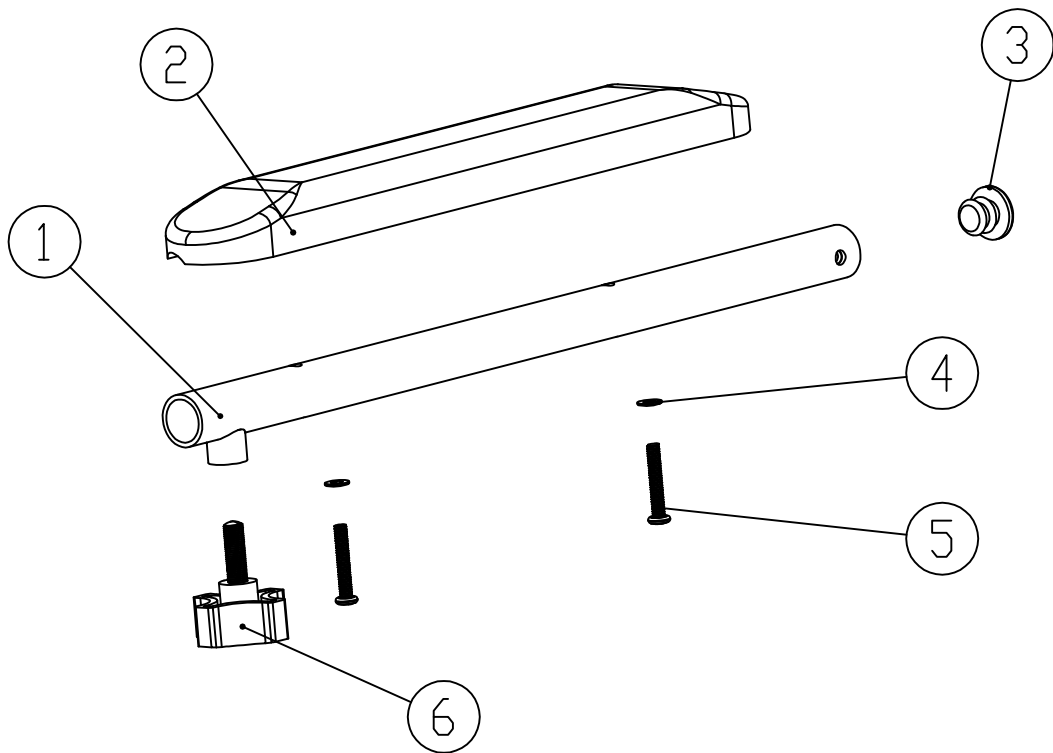



6	P003-554B	梅花旋钮M8×20(有效长度)	1				
5	030306024L	M5×30 加蓝胶	2				
4	030305023	平垫片M5	2				
3	D05-06-08	管塞	1				
2	D05-06-05	扶手垫330mm×45mm牙距190/M5	1				
1	D05-06C.	扶手管组	1				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重	总计量	备 注

					设计		日期	
					校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录			签名	审核	数量	
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)				表面处理		角度	材质	比例
范围				精度		图中未注明的角度公差为±0.3°	名称	D05爆炸图-6
加严				一般			图号	
放宽				镀铬 (CP)			安徽金百合医疗器械有限公司	
>0~10				镀锌 (UCP)				
>10~50				液体漆 (P)				
>50~100				粉体漆 (PP)				
>100~300				氧化 (OX)				
>300~1000				电泳 (ED)				

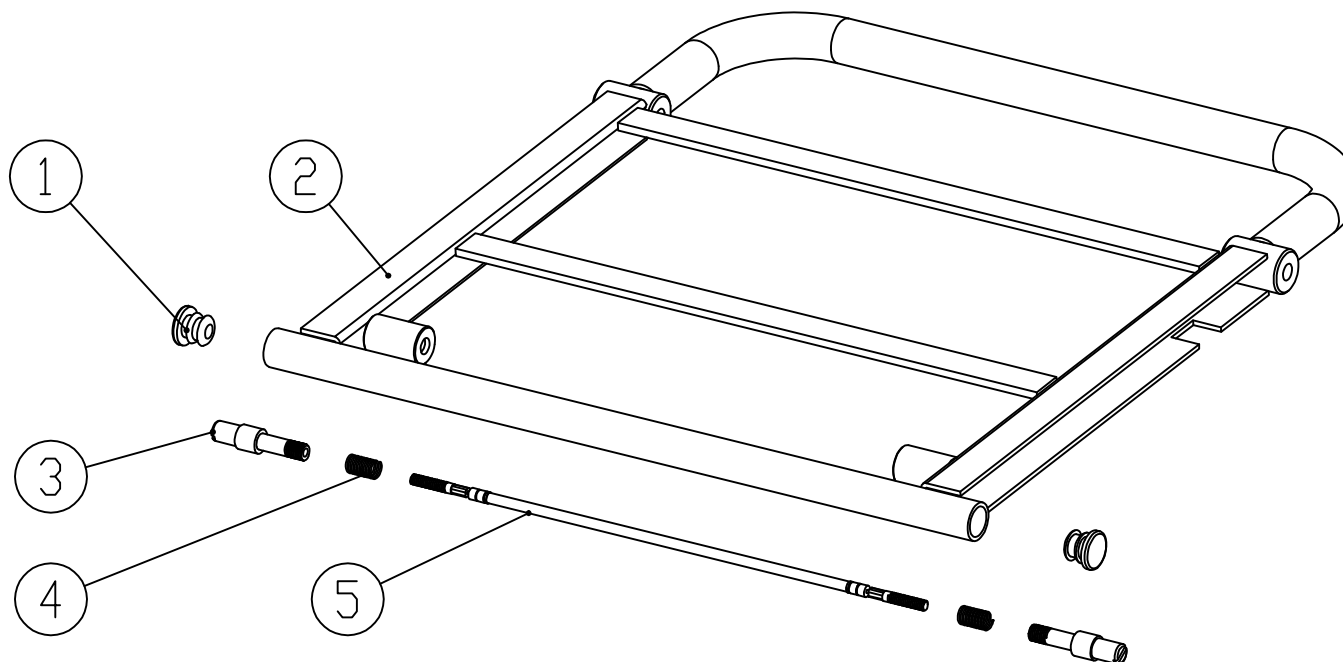


5	D05-04-09	拉锁线 280mm×M5 两端牙长20mm	1				
4	D05-04-09	拉锁弹簧	2				
3	D05-04-08	螺杆 $\phi 12 \times \phi 8 \times 50 \text{mm} \times \text{M}8 \times \text{M}5$	2				
2	D05-04C/A1.	座垫框架	1				
1	D05-06-07	管塞 $\phi 19 \times 15$	2				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注
					重	量	

[illegible]

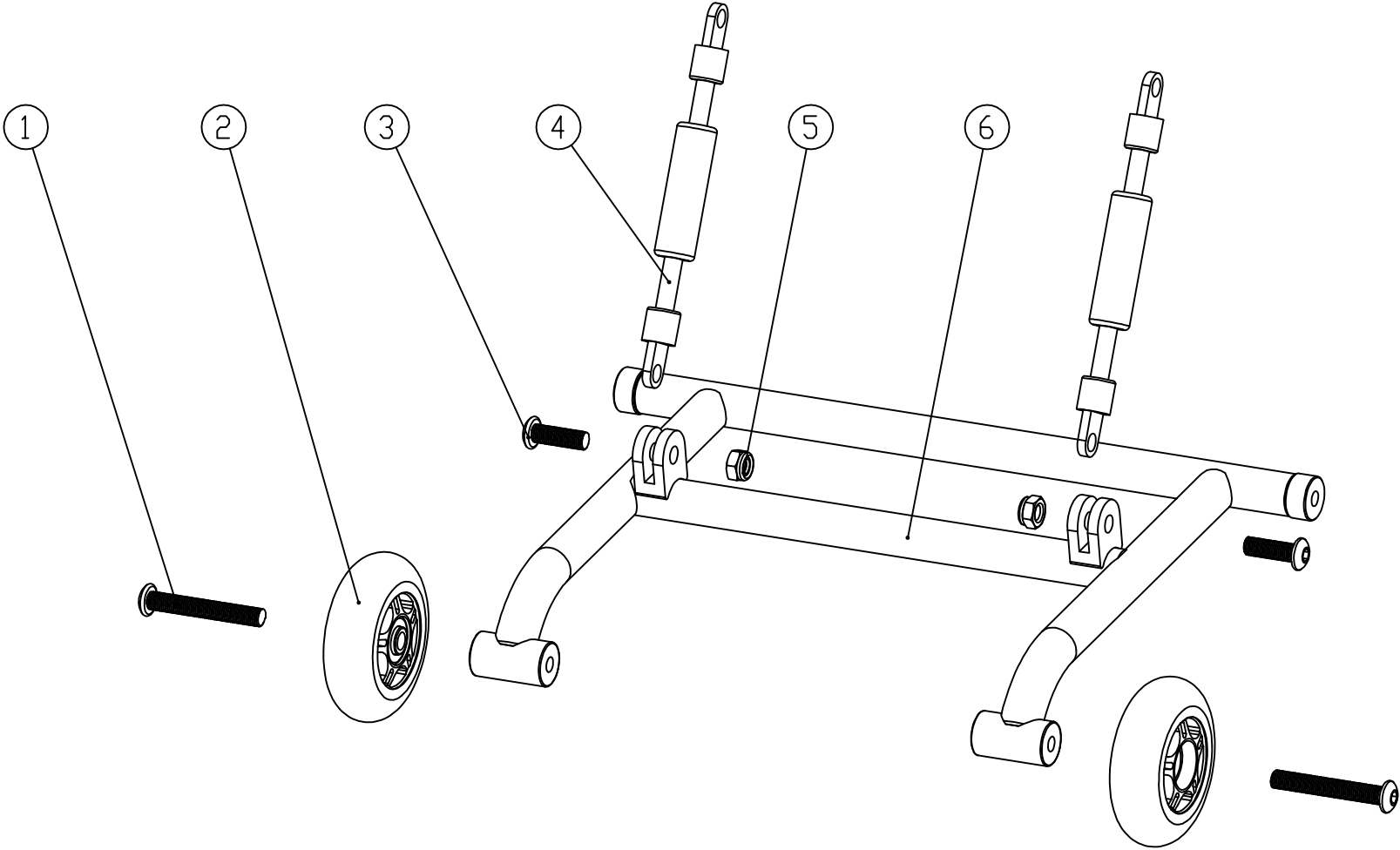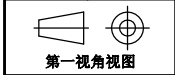



6	D05-10C.	防翻轮架	1				
5	030304021	防松螺母M8	2				
4	D05-10-07A	气弹簧	2				
3	030301009	内六角半圆头螺钉M8×25	2				
2	D05-10-08	防翻轮2.5寸，内孔8轴承	2				
1	030301018L	内六角半圆头螺钉M8×55 加蓝胶	2				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重	总计量	备 注

					设计		日期	
					校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录			签名	审核	数量	
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)		表面处理		角度	材质		比例	1:2
范围	精度	加严	一般	放宽	镀铬(CP)	图中未注明的角度公差为±0.3°	名称	D05爆炸图-8
>0~10	±0.06	±0.1	±0.3	镀锌(UCP)			图号	
>10~50	±0.1	±0.1	±0.5	液体漆(P)				
>50~100	±0.15	±0.2	±0.8	粉末漆(PP)				
>100~300	±0.2	±0.3	±1.2	氧化(OX)				
>300~1000	±0.3	±0.5	±2.0	电泳(EI)				
>1000~2000	±0.5	±1.0	±3.0	浸漆(SF)		安徽金百合医疗器械有限公司 Anhui JBH Medical Apparatus Co.,Ltd.		

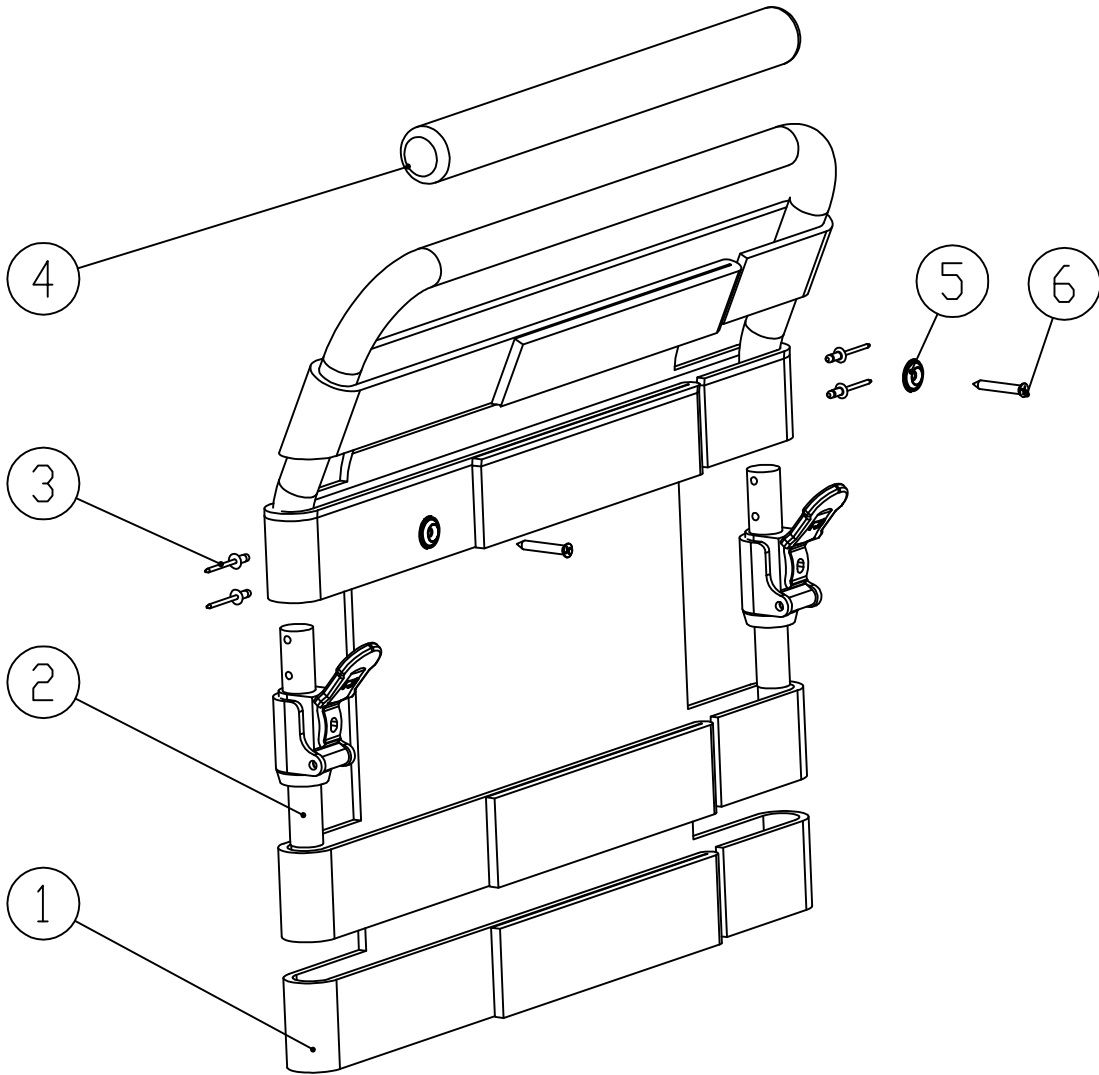

6	030306019	十字槽半沉头自攻螺钉ST4.8×20	2				
5	030305011	压紧垫圈Φ18×3.4	2				
4	D05-05-04	发泡棉管	1				
3	040100016	铆钉4×10	4				
2	D05-05-03	折背器	2				
1	D05-12-02	背垫布	1				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重	总计量	备 注


								设计		日期	
								校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录						签名	审核	数量	
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)			表面处理			角度	材质		比例	1:4	
范围	精度	加严	一般	放宽	镀铬 (CP)	图画中 未注明 的角度 公差为 ±0.3°	名称	D05爆炸图-11			
>0~10	±0.05	±0.1	±0.3	镀锌 (UCP)	图号						
>10~50	±0.1	±0.1	±0.5	液体漆 (P)							
>50~100	±0.15	±0.2	±0.8	粉体漆 (PP)							
>100~300	±0.2	±0.3	±1.2	氧化 (OX)							
>300~1000	±0.3	±0.5	±2.0	电泳 (ED)			安徽金百合医疗器械有限公司				

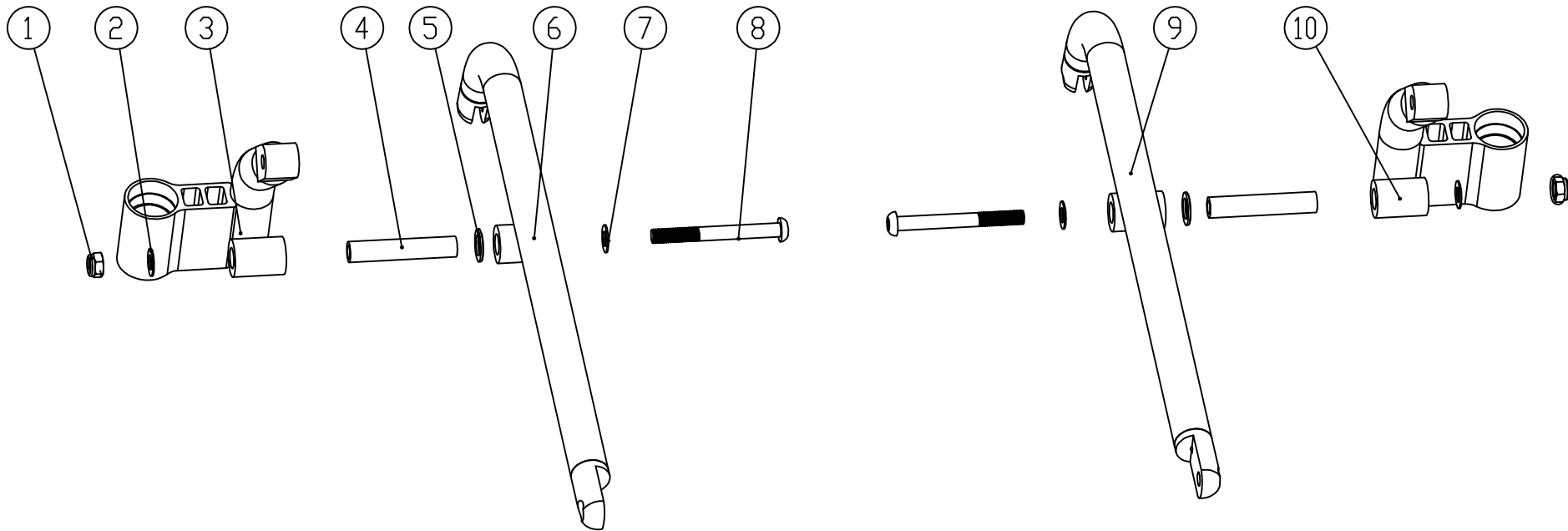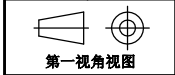

4	D05-07-05(A2)	内衬管 长62.5	2				
3	D05-03LC	前车架左	1				
2	030305021	平垫片M8	2				
1	030304021	防松螺母M8	2				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件 重 量	总计 量	备 注


10	D05-03RC	前车架右	1				
9	D05-07RC	脚踏支撑管组右	1				
8	030301005	内六角半圆头螺钉M8×7.5 半牙	2				
7	030305021	平垫片M8	2				
6	D05-07LC	脚踏支撑管组	1				
5	030305030	尼龙垫片Φ20×Φ12.2×t2	2				

					设计		日期	
					校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录			签名	审核	数量	
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)		表面处理		角度	材质		比例	1:2.5
范围	精度	加严	一般	放宽	镀铬(CP)	图中未注明的角度公差为±0.3°		
>0~10	±0.06	±0.1	±0.3	镀锌(DCP)				
>10~50	±0.1	±0.1	±0.5	液体漆(PP)				
>50~100	±0.15	±0.2	±0.8	粉末漆(PP)				
>100~300	±0.2	±0.3	±1.2	氧化(OX)				
>300~1000	±0.3	±0.5	±2.0	电泳(EI)				
>1000~2000	±0.5	±1.0	±3.0	浸漆(SP)				
					名称	D05爆炸图-13		
					图号			
安徽金百合医疗器械有限公司 Anhui JBH Medical Apparatus Co.,Ltd.								

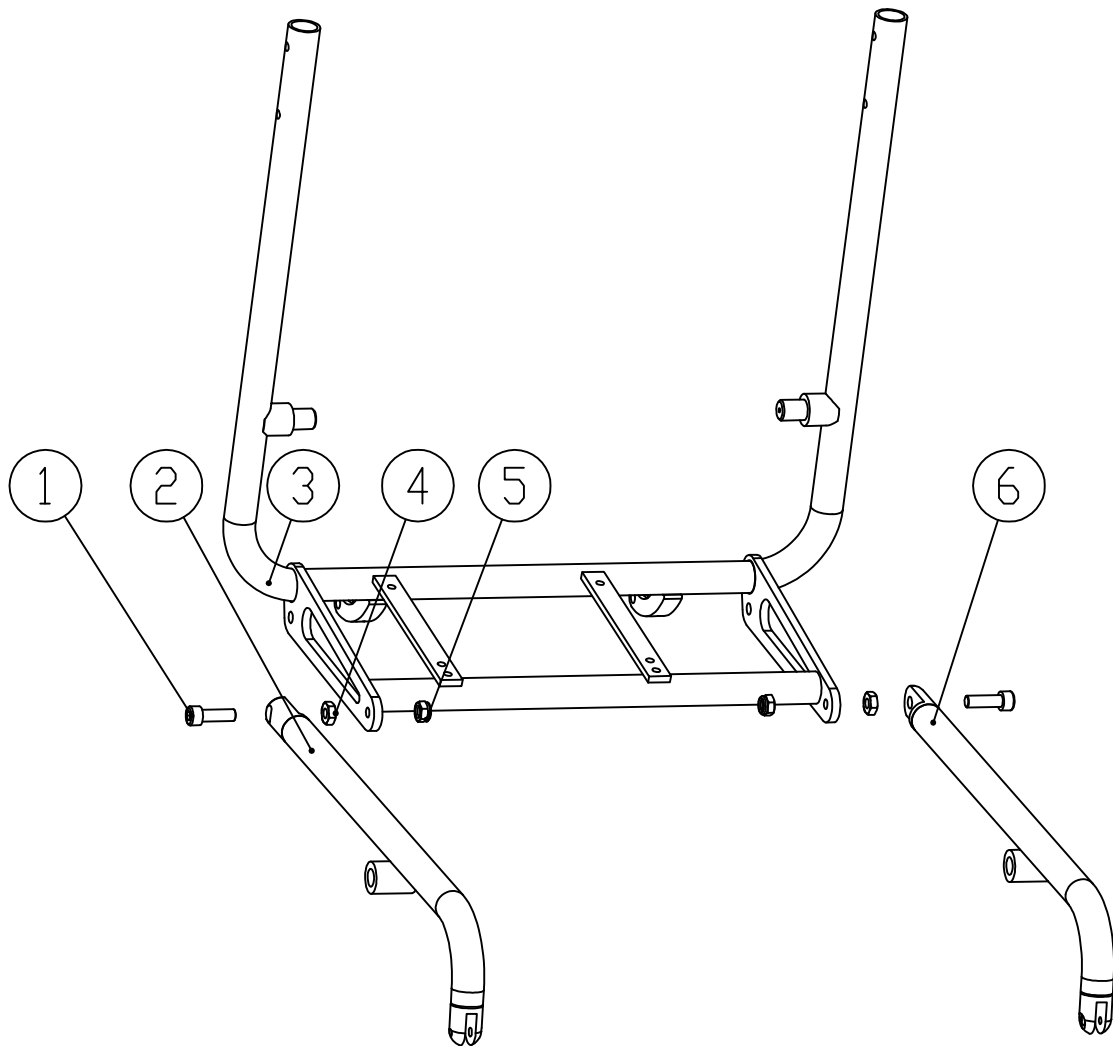




6	D05-07LC.	脚踏支撑管组左	1				
5	030304021	防松螺母M8	2				
4	030304009	普通螺母M8 厚5mm	2				
3	D05-01C/A2.	靠背架	1				
2	D05-07RC.	脚踏支撑管组右	1				
1	030302023	内六角圆柱螺钉M8x25	2				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件 重	总计 量	备 注

					设计		日期	
					校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录			签名	审核	数量	
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)			表面处理	角度	材质		比例	1:5
范围	精度	加严	一般	放宽	镀铬(CP)		D05爆炸图-14	
>0~10	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5	镀锌(UCP)			
>10~50	±0.1	±0.1	±0.5	±0.8	液体漆(P)		安徽金百合医疗器械有限公司	
>50~100	±0.15	±0.2	±0.8	±1.2	粉体漆(PP)			
>100~300	±0.2	±0.3	±1.2	±2.0	氧化(OX)		安徽金百合医疗器械有限公司	
>300~1000	±0.3	±0.5	±2.0	电泳(ED)	电泳(ED)			

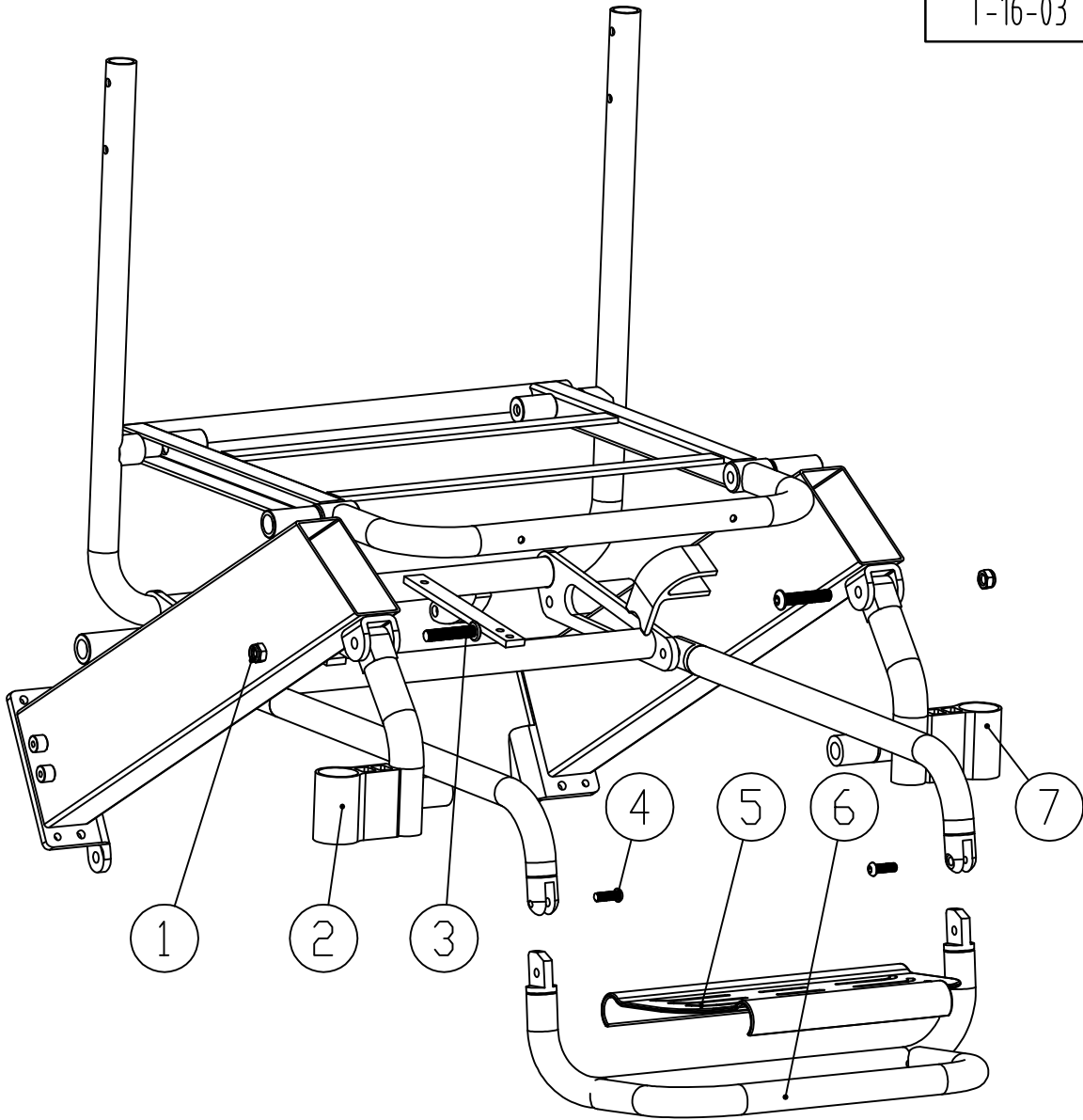

7	D05-03LC.	前车架左	1				
6	D05-08C.	可翻脚踏板组	1				
5	D05-08-04	脚踏板	1				
4	030301022	内六角半圆头螺钉M6×15	2				
3	030301014	内六角半圆头螺钉M8×40	2				
2	D05-03RC.	前车架右	1				
1	030304021	防松螺母M8	2				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重	总计量	备 注


					设计		日期	
					校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录			签名	审核	数量	
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)				表面处理		角度	材质	比例
范围	精度	加严	一般	放宽	镀铬 (CP)	名称 D05爆炸图-15 图号 <		

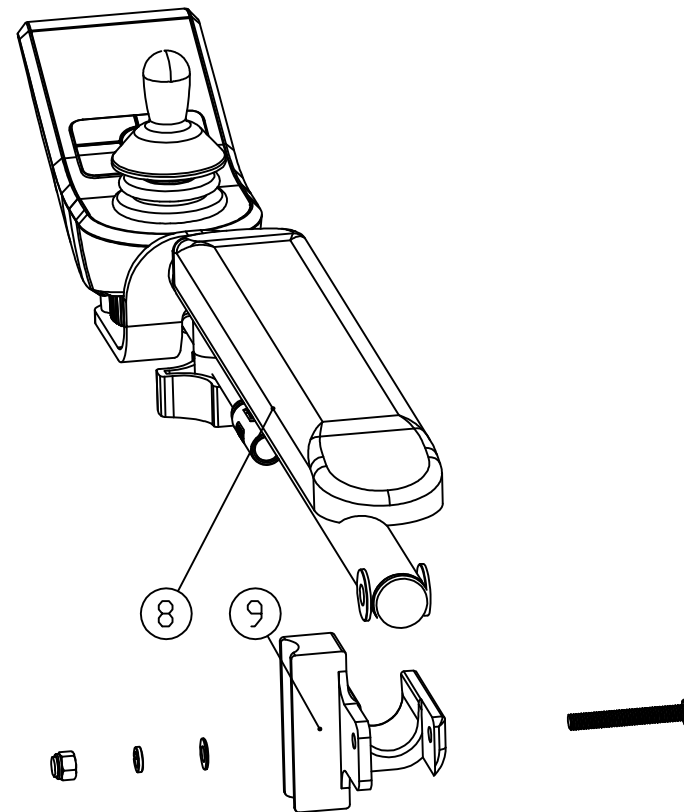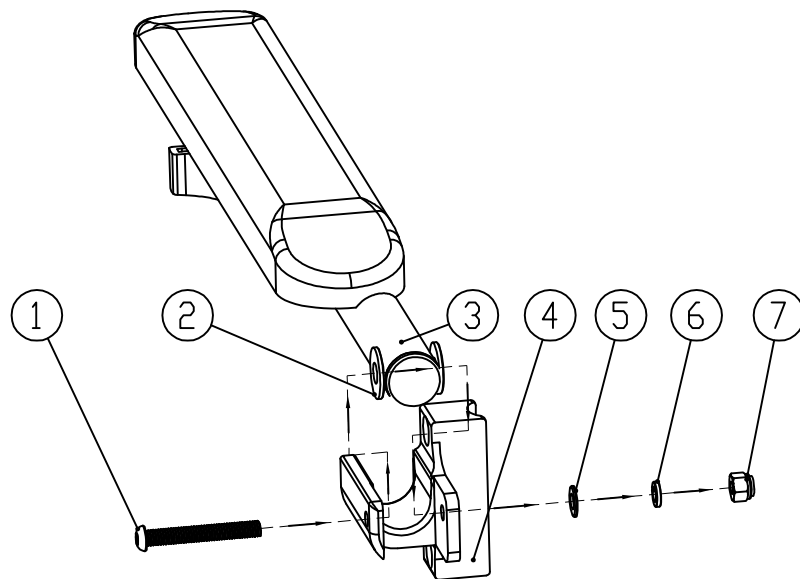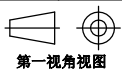

3		左扶手组件	1				
2	030305012	尼龙垫片 $\phi 19 \times \phi 8.2 \times 15$ ($\phi 8$)	4				
1	030301025	内六角半圆头螺钉M6 $\times$ 4.5	2				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件	总计	备 注
					重 量	量	


9	D05-05-02RC(A2)	扶手接头右	1				
8		右手组件及上控组件	1				
7	030304022	防松螺母M6	2				
6	030305027	弹簧垫片M6	2				
5	030305020	平垫片M6	2				
4	D05-05-02LC(A2)	扶手接头左	1				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

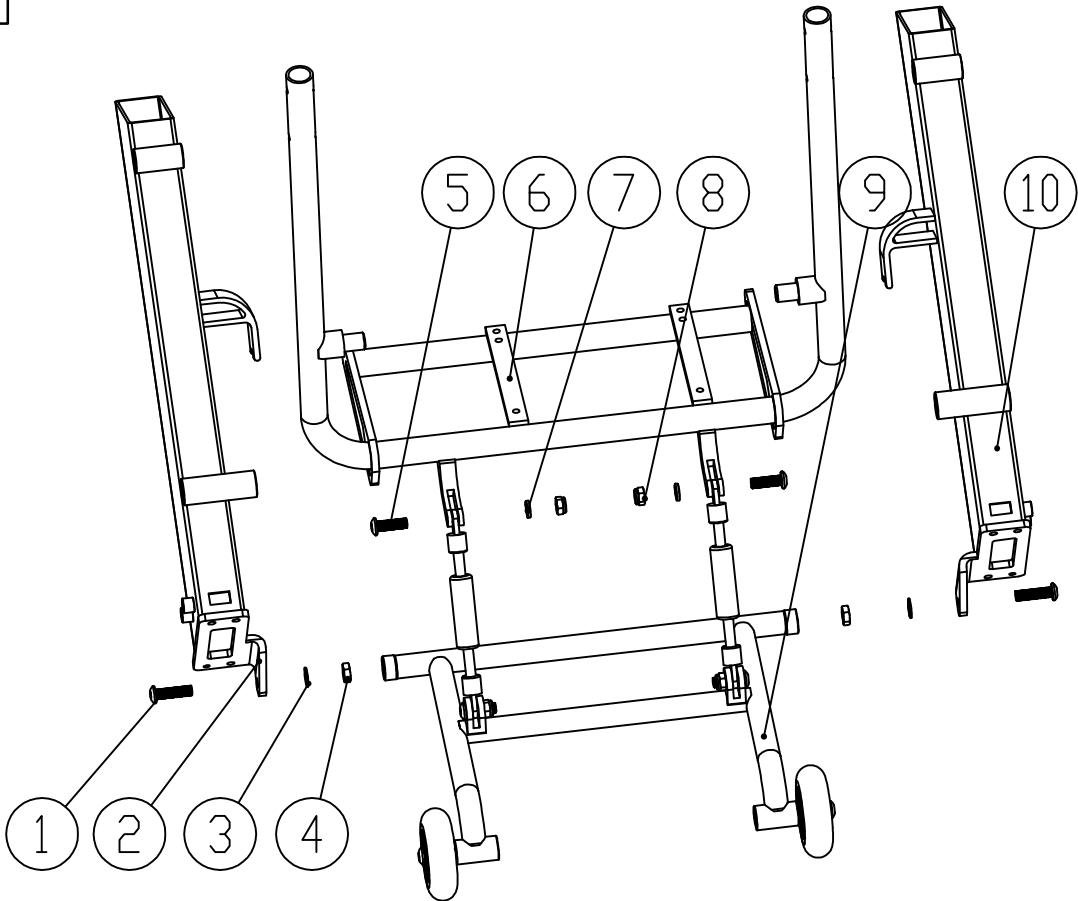


10	D05-02RC(A1).	电池管架右	1				
9	D05-10C.	防翻轮架	1				
8	030304021	防松螺母M8	2				
7	030305029	弹簧垫片M8	2				
6	D05-01C/A2.	靠背架	1				
5	030301009	内六角半圆头螺钉M8×25	2				
4	030304009	普通螺母M8 厚5mm	2				
3	030305021	平垫片M8	2				
2	D05-02LC(A1).	电池管架左	1				
1	030301012	内六角半圆头螺钉M8×30	2				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重	总计量	备 注

							设计		日期		
							校对		单位	mm	
标记	变更日期	变更记录				签名	审核		数量		
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)					表面处理		角度	材质		比例	1:6
范围	精度	加严	一般	放宽	镀铬 (CP)	图画中 未注明 的角度 公差为 ±0.3°	名称	D05爆炸图-17			
>0~10	±0.05	±0.1	±0.3	镀锌 (UCP)	图号						
>10~50	±0.1	±0.1	±0.5	液体漆 (P)	安徽金百合医疗器械有限公司						
>50~100	±0.15	±0.2	±0.8	粉体漆 (PP)							
>100~300	±0.2	±0.3	±1.2	氧化 (OX)							
>300~1000	±0.3	±0.5	±2.0	电泳 (ED)							

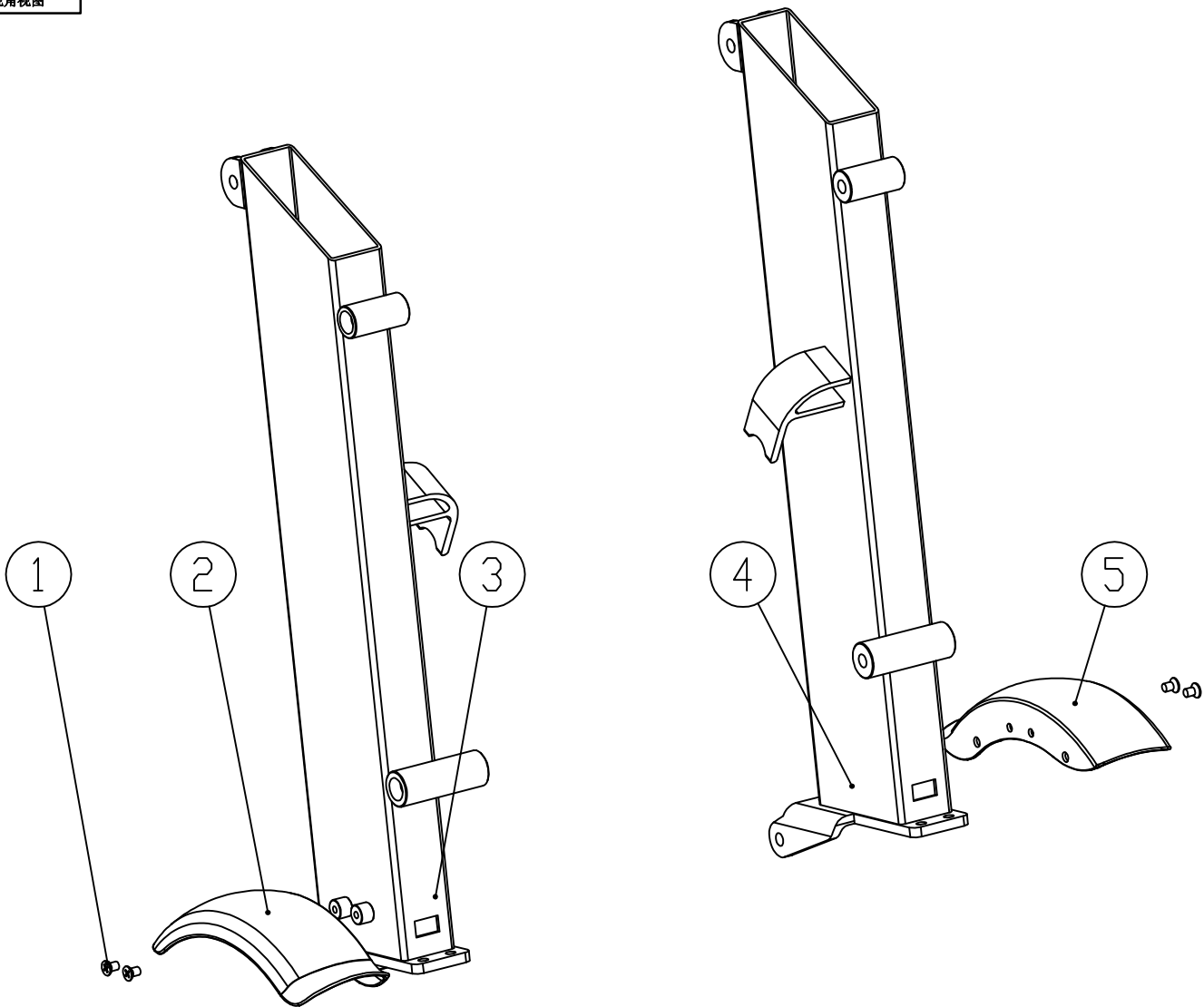


5	D05-13-02R	挡泥板右	1				
4	D05-02RC(A1).	电池管架右	1				
3	D05-02LC(A1).	电池管架左	1				
2	D05-13-02L	挡泥板左	1				
1	030306007	十字沉头螺丝M5×8	4				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重	总计量	备 注

					设计		日期	
					校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录			签名	审核	数量	
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)				表面处理		角度	材质	比例
范围	精度	加严	一般	放宽	镀铬 (CP)	图画中 未注明 的角度 公差为 ±0.3°	名称	D05爆炸图-18
>0~10	±0.05	±0.1	±0.3	镀锌 (UCP)	图号		安徽金百合医疗器械有限公司	
>10~50	±0.1	±0.1	±0.5	液体漆 (P)				
>50~100	±0.15	±0.2	±0.8	粉体漆 (PP)				
>100~300	±0.2	±0.3	±1.2	氧化 (OX)				
>300~1000	±0.3	±0.5	±2.0	电泳 (ED)				

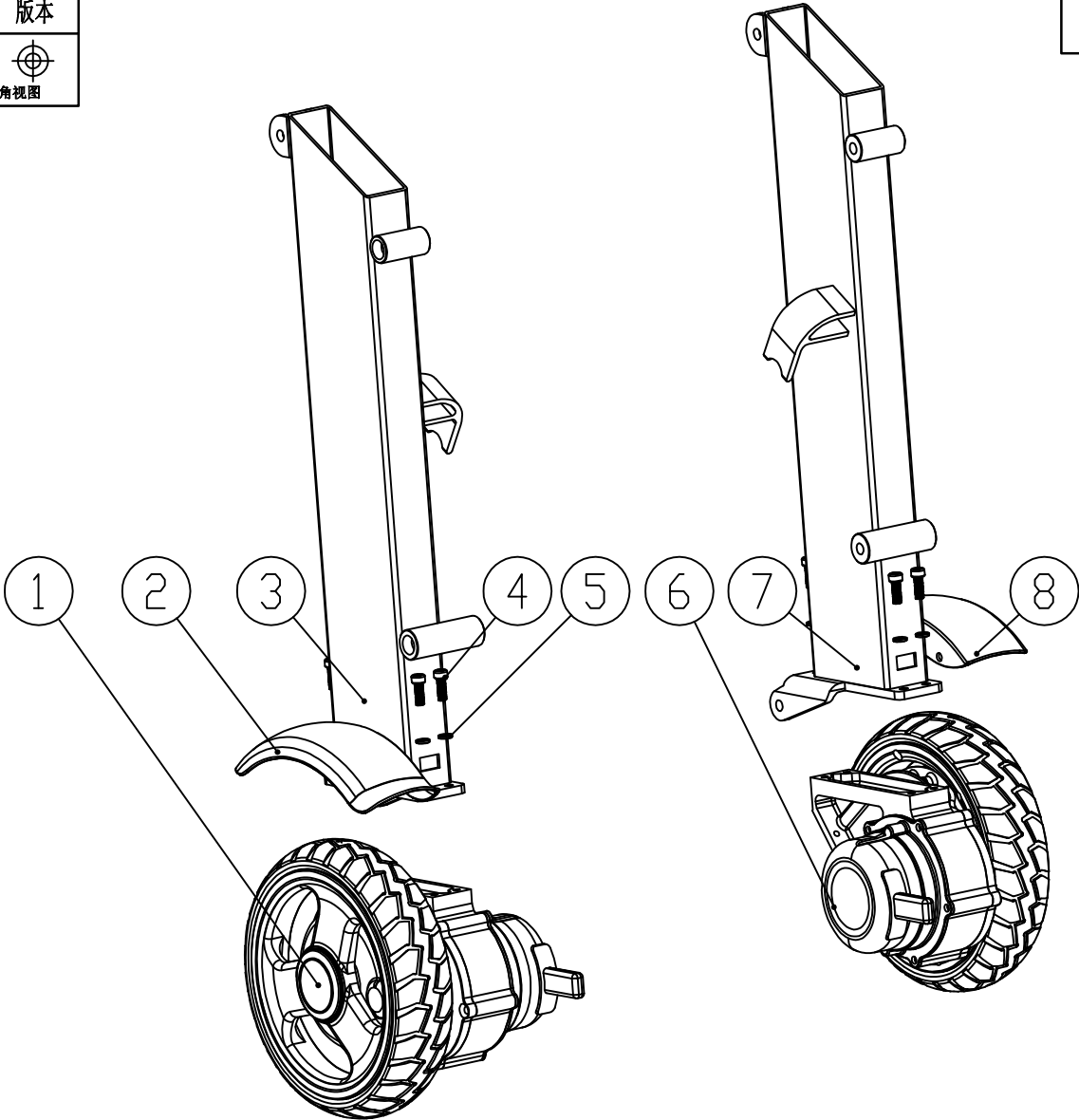

8	D05-13-02R	挡泥板右	1				
7	D05-02RC(A1).	电池管架右	1				
6	MF001-180-02R	电机8寸/180W 右	1				
5	030305027	弹簧垫片M6	8				
4	030302030	内六角圆柱螺钉M6×20	8				
3	D05-02LC(A1).	电池管架左	1				
2	D05-13-02L	挡泥板左	1				
1	MF001-180-02L	电机8寸/180W 左	1				
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重	总计量	备 注

					设计		日期	
					校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录			签名	审核	数量	
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)				表面处理	角度	材质	比例	1:5
范围	精度	加严	一般	放宽	镀铬 (CP)	名称	D05爆炸图-19	
>0~10	±0.05	±0.1	±0.3	镀锌 (UCP)	液体漆 (P)			
>10~50	±0.1	±0.1	±0.5	粉体漆 (PP)	氧化 (OX)			
>50~100	±0.15	±0.2	±0.8	电泳 (ED)	图号		安徽金百合医疗器械有限公司	
>100~300	±0.2	±0.3	±1.2					
>300~1000	±0.3	±0.5	±2.0					

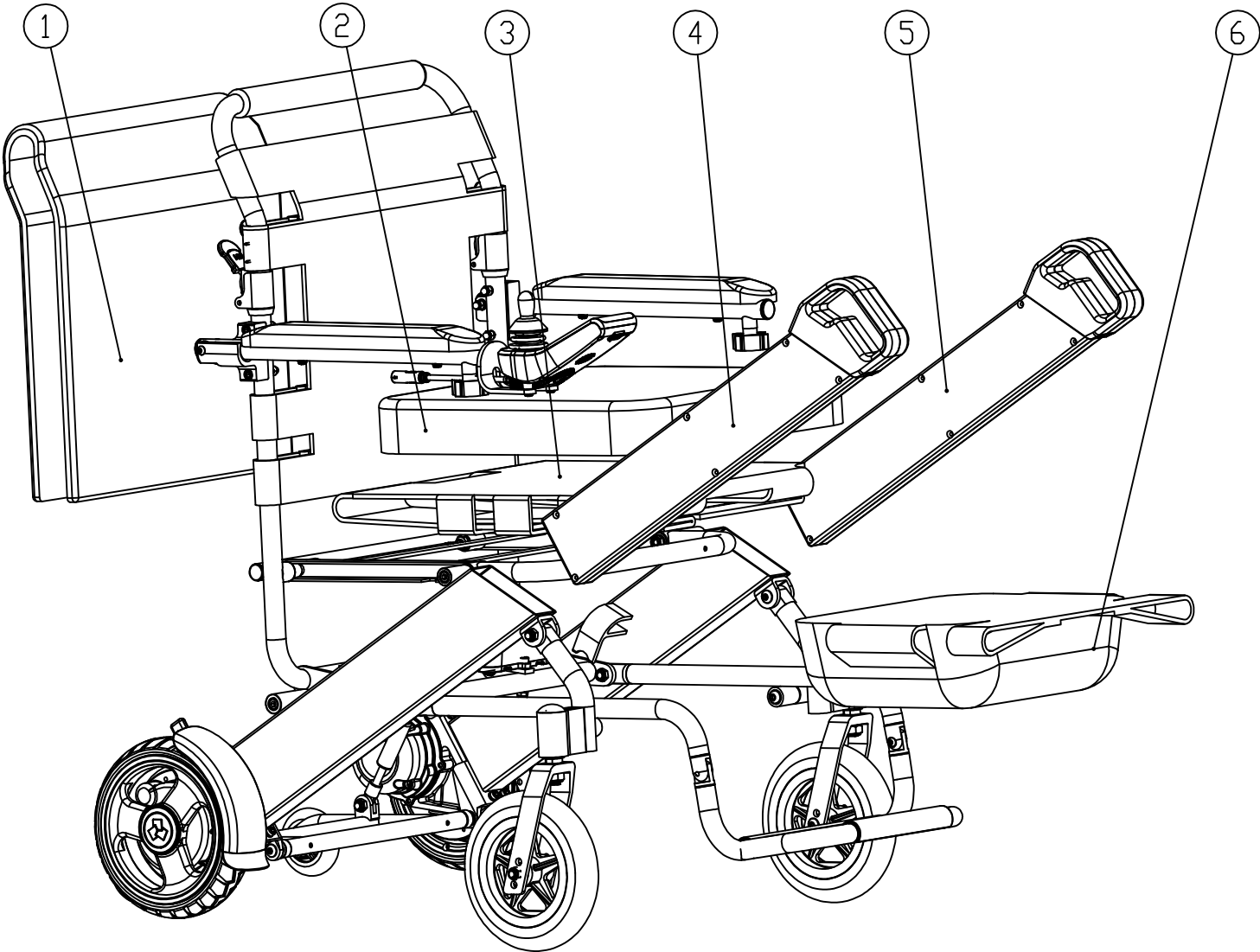

6	D05-12-05	储物袋	1				
5	D05-24L	电池 左MFD17-D05-24V10Ah	1				
4	D05-24R	电池 右MFD17-D05-24V10Ah	1				
3	D05-12-01	座垫布	1				
2	D05-12-03-02	座垫400×400×60	1				
1	D05-12-04-04	背垫	1				
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注

					设计		日期	
					校对		单位	mm
标记	变更日期	变更记录			签名	审核	数量	
尺寸公差mm(没有说明时选用一般公差)		表面处理		角度	材质		比例	1:5
范围	精度	加严	一般	放宽	镀锌(ZF)	名称 D05爆炸图-20 图号	安徽金百合医疗器械有限公司 Anhui JBH Medical Apparatus Co., Ltd.	
>0~10	±0.06	±0.1	±0.3	镀锌(DF)				
>10~50	±0.1	±0.1	±0.5	液体漆(P)				
>50~100	±0.15	±0.2	±0.8	粉末漆(PP)				
>100~300	±0.2	±0.3	±1.2	氧化(OX)				
>300~1000	±0.3	±0.5	±2.0	电泳(EI)				
>1000~2000	±0.5	±1.0	±3.0	浸塑(SI)	图中未注明的角度公差为±0.3°			